

Instrucciones de uso

Pluma precargada multidosis

Cada pluma contiene 4 dosis fijas, una dosis administrada semanalmente.

Mounjaro 2,5 mg/dosis KwikPen solución inyectable en pluma precargada

Mounjaro 5 mg/dosis KwikPen solución inyectable en pluma precargada

Mounjaro 7,5 mg/dosis KwikPen solución inyectable en pluma precargada

Mounjaro 10 mg/dosis KwikPen solución inyectable en pluma precargada

Mounjaro 12,5 mg/dosis KwikPen solución inyectable en pluma precargada

Mounjaro 15 mg/dosis KwikPen solución inyectable en pluma precargada

Tirzepatida

Estas instrucciones de uso contienen información sobre cómo inyectar Mounjaro KwikPen



Información importante que debe conocer antes de inyectarse Mounjaro KwikPen.

Lea estas instrucciones de uso y el prospecto antes de empezar a inyectarse Mounjaro KwikPen y cada vez que obtenga una nueva pluma. Es posible que haya información nueva. Esta información no reemplaza la conversación con su médico, enfermero o farmacéutico acerca de su situación médica o tratamiento.

Mounjaro KwikPen es una pluma precargada multidosis desechable. **La pluma contiene 4 dosis fijas, una dosis administrada semanalmente.** Inyecte una sola inyección semanal, debajo de la piel (por vía subcutánea).


Después de 4 dosis, tire (deseche) la pluma, incluido el medicamento no utilizado. La pluma evitará que marque una dosis completa después de haberse administrado 4 dosis semanales. **No** inyecte el medicamento sobrante. No transfiera el medicamento de la pluma a una jeringa.

No comparta su Mounjaro KwikPen con otras personas, incluso si se ha cambiado la aguja de la pluma. Usted puede contagiar a otras personas una infección grave o contraer una infección grave de ellas.

Las personas ciegas o con problemas de visión no deben usar la pluma sin la ayuda de una persona capacitada para usarla.

Guía de partes

Partes de Mounjaro KwikPen

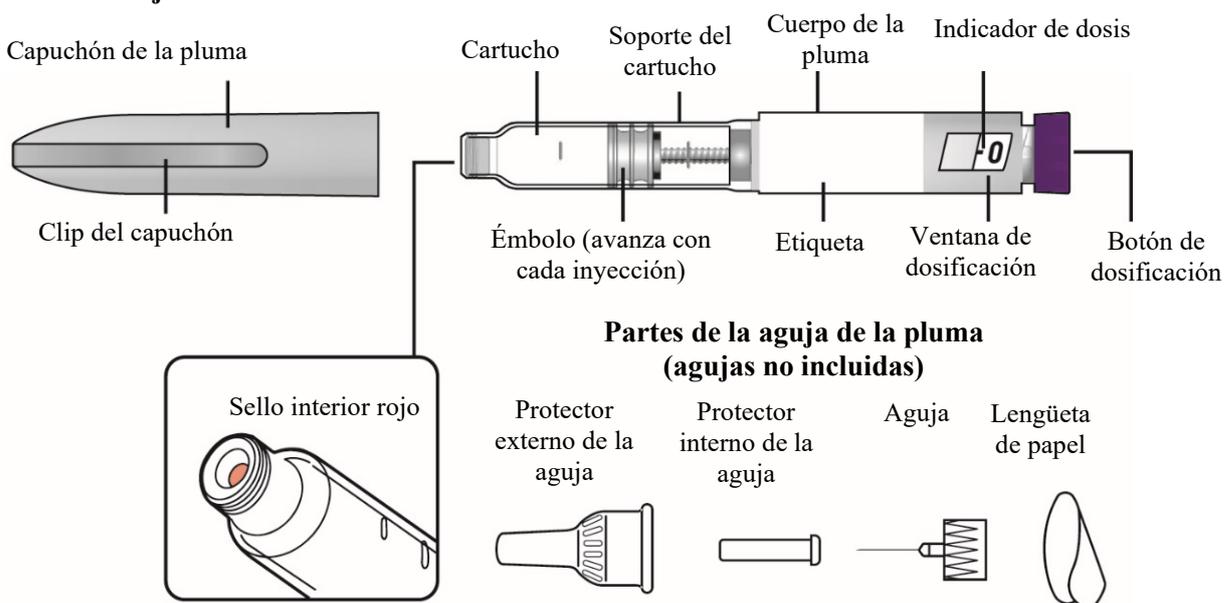


Aguja compatible con KwikPen (si no sabe qué aguja utilizar para la pluma, hable con su profesional sanitario)

Materiales necesarios para inyectarse


- Mounjaro KwikPen
- Aguja compatible con KwikPen (Si no sabe qué aguja para la pluma utilizar, hable con su profesional sanitario)
- Bastoncillo, gasa o bola de algodón
- Recipiente para desechar objetos punzantes o contenedor doméstico

Preparación para inyectar Mounjaro KwikPen

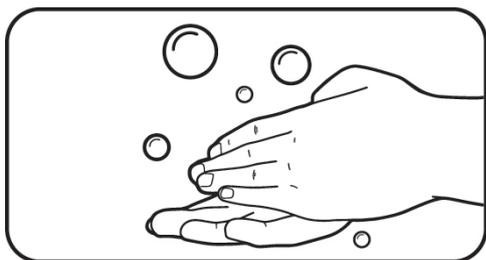


Paso 1:

- Lávese las manos con agua y jabón.

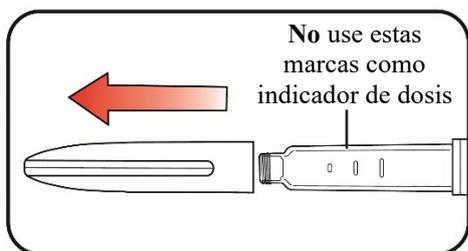


Paso 2:

- Tire del capuchón de la pluma.
- Inspeccione la pluma y la etiqueta. **No** lo use si:
 - el nombre del medicamento o la concentración de la dosis no coinciden con su receta.
 - la pluma está caducada (CAD) o parece dañada.
 - el medicamento se ha congelado, tiene partículas, está turbio o está descolorido. Mounjaro debe ser entre incoloro a ligeramente amarillo.

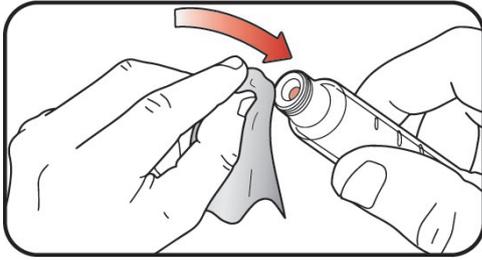


Paso 3:

- Limpie el sello interior rojo con un bastoncillo.

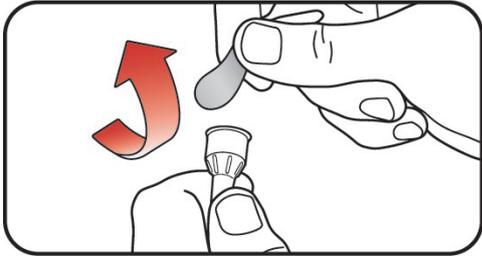


Paso 4:

- **Seleccione una nueva aguja para la pluma.** Utilice siempre una nueva aguja para la pluma para cada inyección para ayudar a prevenir infecciones y agujas bloqueadas.
- Retire la lengüeta de papel del protector externo de la aguja.

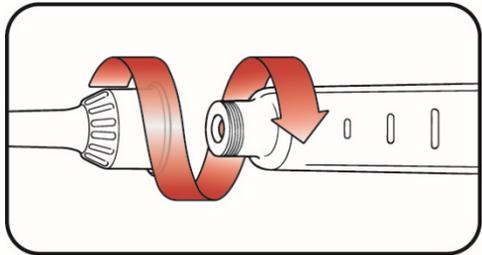


Paso 5:

- Empuje directamente la aguja encapuchada sobre la pluma y gírela hasta que quede apretada.

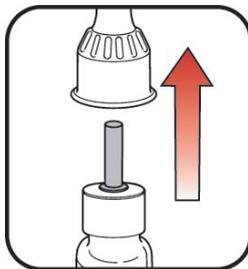


a. Protector externo de la aguja

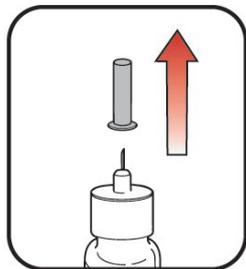

b. Protector interno de la aguja


Paso 6:

- Retire el protector externo de la aguja y guárdelo. Éste se reutilizará.
- Retire el protector interno de la aguja y deséchelo.

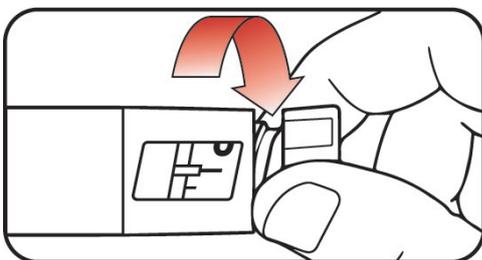


Paso 7:

- Gire lentamente el botón de dosificación hasta que oiga **2 clics** y se muestre la línea alargada  en la ventana de dosificación. Esta es la posición inicial. Se puede corregir girando el botón de dosificación en cualquier dirección hasta que la posición inicial se alinee con el indicador de dosis.

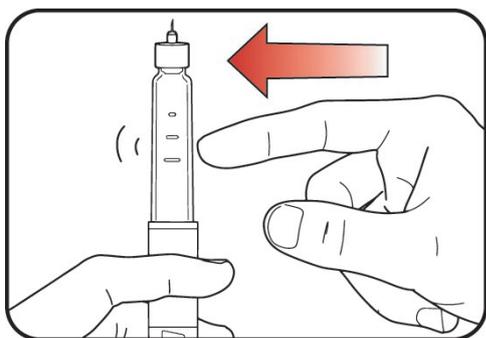

Paso 8:

- Sujete la pluma con la aguja hacia arriba.
- Golpee suavemente el soporte del cartucho para recoger las burbujas de aire de la parte superior.

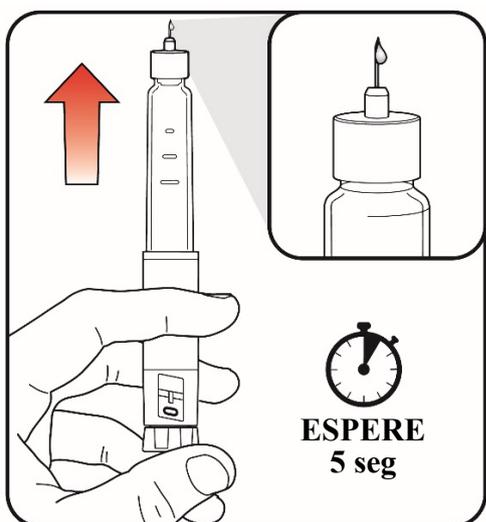


Paso 9:

- Suelte un poco de medicamento en el aire **empujando el botón de dosificación** hasta que se detenga, luego **cuente lentamente hasta 5 mientras mantiene pulsado el botón de dosificación**. El icono debe aparecer en la ventana de dosificación. **No** se lo inyecte en el cuerpo.

El purgado elimina el aire del cartucho y garantiza el correcto funcionamiento de la pluma. La pluma se ha purgado si sale una pequeña cantidad de medicamento por la punta de la aguja de la pluma.

- Si no ve el medicamento, repita **los pasos del 7 a 9**, no más de 2 veces adicionales.
- Si sigue sin ver el medicamento, cambie la aguja de la pluma y repita **los pasos del 7 a 9**, como máximo una vez más.
- Si sigue sin ver el medicamento, póngase en contacto con la oficina local de **Lilly** indicada en el prospecto.

Inyección de Mounjaro KwikPen

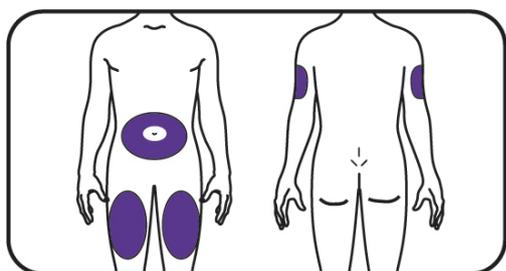


a. Parte delantera

b. Parte trasera


Paso 10:

- Elija una zona de inyección.
 - a. Usted u otra persona le puede inyectar el medicamento en el muslo o en el abdomen a una distancia mínima de 5 cm del ombligo.
 - b. Otra persona le debe poner la inyección en la parte posterior de la parte superior del brazo.
- **Cambie** la zona de la inyección cada semana. Puede utilizar la misma zona de su cuerpo, pero asegúrese de elegir un sitio de inyección diferente en esa zona.

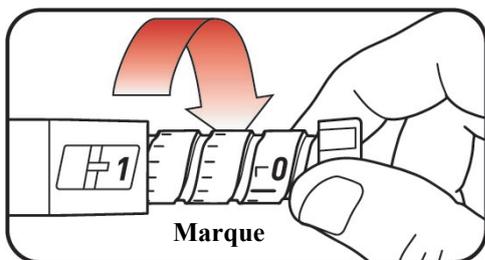


Paso 11:

- Gire el botón de dosificación hasta que se detenga y aparezca el icono **1** en la ventana de dosificación. **El icono **1** equivale a una dosis completa.**

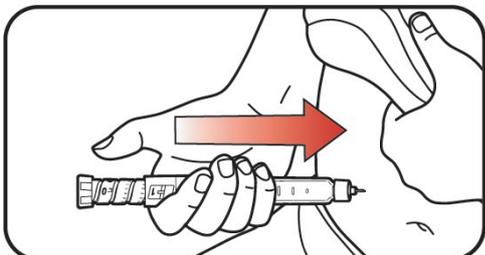


Paso 12:

- a. Introduzca la aguja en su piel.

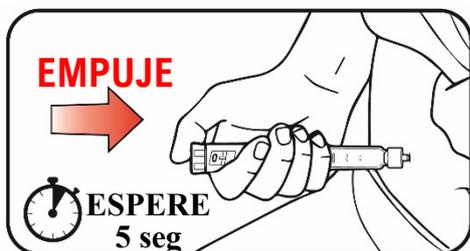

- b. Inyecte el medicamento **empujando el botón de dosificación hacia dentro** hasta que se detenga y, a continuación, **cuente lentamente hasta 5 mientras mantiene pulsado el botón de dosificación**. El icono **0** debe aparecer en la ventana de dosificación antes de retirar la aguja.

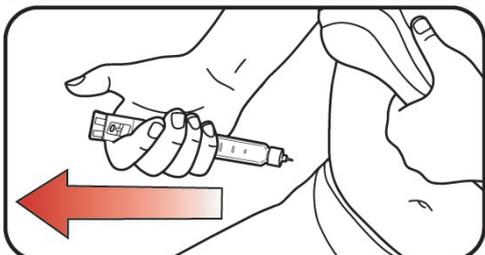

Paso 13:


- Saque la aguja de la piel. Es normal que quede una gota de medicamento en la punta de la aguja. No afectará a su dosis.
- Confirme que el icono **0** aparece en la ventana de dosificación.

Si ve el icono **0** en la ventana, significa que ha recibido la dosis completa.

Si no ve el icono **0** en la ventana de dosificación, vuelva a insertar la aguja en la piel y termine la inyección. **No** vuelva a marcar la dosis.


Si sigue creyendo que no ha recibido la dosis completa, **no** empiece de nuevo ni repita la inyección. Para más información, consulte las secciones «Conservación de su Mounjaro KwikPen» o «Preguntas frecuentes».

Después de su inyección de Mounjaro KwikPen

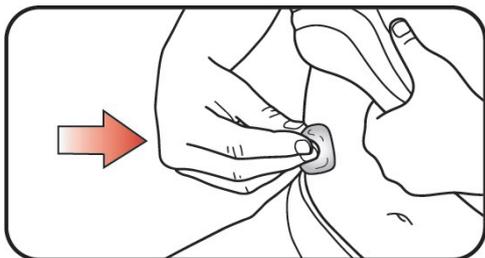


Paso 14:

- Si observa sangre después de extraer la aguja de la piel, presione ligeramente la zona de la inyección con una gasa o un algodón. **No** frote la zona de la inyección.

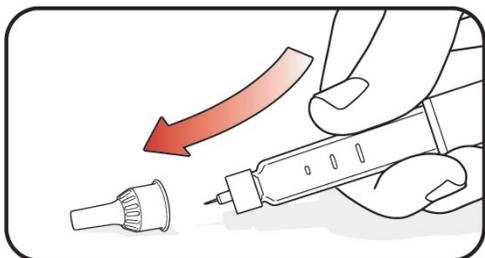


Paso 15:

- Vuelva a colocar con cuidado el protector externo de la aguja.

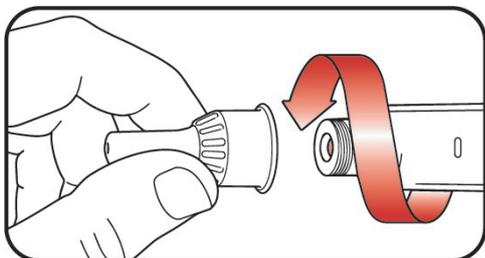

Paso 16:

- Desenrosque la aguja tapada y deposítela en un contenedor para desechos punzantes (ver “Eliminación de Mounjaro KwikPen y de las agujas de la pluma”). **No** guarde la pluma con la aguja puesta para evitar fugas, que se bloquee la aguja y que entre aire en la pluma.

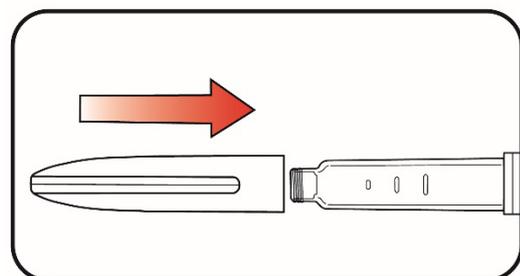

Paso 17:

- Vuelva a poner el capuchón de la pluma. **No** guarde la pluma sin el capuchón puesto.

Conservación de su Mounjaro KwikPen

Plumas sin usar:

- Conserve **las plumas sin usar** en la nevera entre 2°C y 8°C.
- Las plumas sin usar se pueden utilizar hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta si la pluma se ha conservado en el frigorífico.
- **No** congele la pluma. Tire (deseche) la pluma si se ha congelado.

Plumas usadas:

- Puede guardar su **pluma usada a temperatura ambiente** por debajo de 30°C después de la inyección.
- Mantenga la pluma y las agujas fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Deseche la pluma 30 días después de su primer uso, aunque todavía contenga medicamento.

- Deseche la pluma después de recibir 4 dosis semanales. Si se intenta inyectar el medicamento sobrante, la dosis podría quedar incompleta, aunque todavía quede medicamento en la pluma.

Medicamento sobrante:

- Después de terminar la **cuarta inyección**, verá algo de medicamento que sobra, lo cual es normal. Este medicamento sobrante garantiza el correcto funcionamiento de la pluma.
 - Deseche la pluma.
 - Aunque aún quede medicamento en la pluma, **no** intente inyectarse el medicamento sobrante. Si intenta inyectarse el medicamento sobrante, podría recibir una dosis incompleta.



Eliminación de Mounjaro KwikPen y de las agujas de la pluma

- Deposite las agujas de la pluma usadas en un contenedor para desechos punzantes o en un recipiente de plástico duro con tapa segura.
- **No** tire (deseche) las agujas de la pluma sueltas en la basura doméstica.
- Deseche la pluma usada siguiendo las instrucciones de su profesional sanitario.
- Pregunte a su profesional sanitario sobre las opciones para desechar el contenedor de objetos punzantes correctamente.
- No recicle su contenedor de objetos punzantes usado.

Preguntas frecuentes

- Si no puede quitar el capuchón de la pluma, gírelo suavemente hacia delante y hacia atrás y, a continuación, tire del capuchón para sacarlo.
- Si no puede girar el botón de dosificación hasta que **1** aparezca en la ventana de dosificación:
 - deseche la pluma, incluido el medicamento no utilizado. Es posible que no quede suficiente medicamento en la pluma para administrar una dosis completa. **No** intente inyectarse el medicamento sobrante.
- Si le cuesta apretar el botón de dosificación:
 - pulsando el botón de dosificación más lentamente, le resultará más fácil inyectarse.
 - su aguja puede estar obstruida. Coloque una aguja nueva y purgue la pluma.
 - puede que haya polvo, comida o líquido dentro de la pluma. Tire la pluma y compre una nueva.
- Si tiene alguna pregunta o problema adicional con Mounjaro KwikPen póngase en contacto con **Lilly** o con su médico, enfermero o farmacéutico.

Calendario médico

Use Mounjaro KwikPen 1 vez a la semana.

Me administro mi dosis semanal en las fechas indicadas a continuación.

Escriba el día de la semana que desea inyectarse. Inyéctese ese día cada semana (ejemplo: lunes).

(Día/Mes) (Día/Mes) (Día/Mes) (Día/Mes)

--

--	--	--	--

Última revisión en febrero 2025